

PHILIPS HEARTSTART HS1/FRx TRAINER INKL. FERNBEDIENUNG

Dank der Fernbedienung kann auf jedem Übungsmodell und in jeder Situation ein realistisches Training gegeben werden. Der Kursleiter kann mittels der Fernbedienung selbst bestimmen, wann der Trainer in die Analysephase schaltet. Der externe oder interne Adapter ist nicht mehr notwendig (kann aber weiterhin zusätzlich genutzt werden)

Werden während der Analysephase die Elektroden von der Übungspuppe entfernt, kann der Kursleiter mit der Fernbedienung zum Anfang der Situation „Elektroden aufkleben“ zurückkehren.

Während der Anschlussphase der Elektroden kann durch Drücken der Taste A der Trainer in die Analysephase geschaltet werden.

Das Umschalten in die Analysephase ist nur möglich, wenn die Elektroden nicht mehr in der Kassette sind und von der gelben Folie entfernt und aufgeklebt wurden.

Vor dem Einsatz:

- Kleben Sie den Aufkleber "ZIEHEN" auf die Elektrodenkassette (nur bei HS1)
- Legen Sie vier AA-Batterien in den Rückseite des Trainers ein
- Die Fernbedienung ist bereits mit einer Batterie ausgestattet
- Die Fernbedienung ist mit einem bestimmten Trainer verbunden. Auf der Rückseite des Trainers befindet sich eine Code, dieser muss mit dem Code auf der Fernbedienung übereinstimmen

1. Inbetriebnahme:

- Drücken Sie die blaue I-Taste, um das gewünschte Szenario auszuwählen. Die verschiedenen Szenarien finden Sie auf der Rückseite des Trainers
- Durch das Drücken der grünen An-/Austaste startet der Trainer mit dem Training
- Beim ersten Gebrauch der Fernbedienung dauert der Verbindungsaufbau ein paar Sekunden länger. Verbinden Sie den Trainer, indem Sie auf der Fernbedienung die A-Taste drücken. Man hört ein leises Klicken.

Während des Einsatzes:

- Der Kursteilnehmer muss den Anweisungen des Trainer folgen. Die Anweisungen passen sich automatisch an das Tempo des Kursteilnehmers an.
- Sobald der Kursteilnehmer die Elektroden korrekt auf dem Körper der Puppe aufgeklebt hat, kann auf der Fernbedienung die A-Taste gedrückt werden. Der Trainer wird dann die Analyse starten.
- Werden während der Analysephase die Elektroden von der Übungspuppe entfernt, kann der Kursleiter durch Drücken der B-Taste zum Anfang der Simulation zurückkehren. Der Trainer fragt den Kursteilnehmer, die Elektroden erneut zu platzieren.
- Während der 2-minütigen Reanimation kann die Analyse nicht neu gestartet werden. Der Kursteilnehmer muss die Reanimation abschließen, dies entspricht der realen Reanimation.